

1. Placering af skab.
2. Skabet fastmonteres på væg / stativ.
3. EL-tilslutning. Spænding 230V skal forsikres via HPFI-relæ.
4. Kontrol af flex-kabel for betjeningspanel.
5. Montering af låsepal i lågen.
6. Tilmelding af mobil numre / ændring af fabriksindstillet kodelås 1111.
7. Åbning af skabet.
8. Vigtigt test af tastatur.
9. Datablad.
10. Vedligehold/rengøring.


1. Placering af skab:
(Anbefalet montage højde se tegning)

Skabet er fremstillet til at kunne klare ophængning under alle normale forhold.


Vedligeholdsmæssigt vil det altid være en fordel at ophænge et hjertestarterskab med mindst mulig direkte sol.

Bliver skabet monteret under et halvtæg, hvor skabet ikke bliver udsat for naturlig afvaskning (*regnvand*), anbefales ofte vask af skabet, da der ellers kan

Wall side view

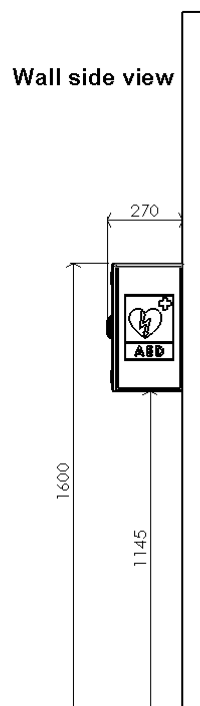

Wall viewed from the front

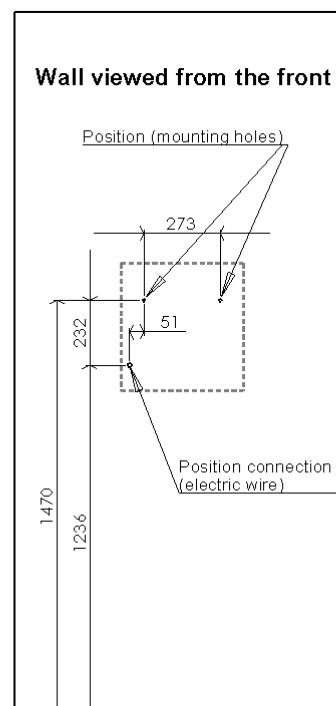

2. Skabet fastmonteres på væg / stativ.:

(Væggen skal være lige og stabil, skabet må ikke vrides)



3. EL-INSTALLATION SKAL UDFØRES AF AUTORISERET EL-INSTALLATØR

Skabet skal forsynes med 230V, vi anbefaler fra egen EL-gruppe.

PG M16 og blindprop kan monteres fast bag på skabet eller i bunden, alt efter ønsket installation.




4. Kontrol af flex-kabel for betjeningspanel.
Løsn de 2 umbraco skruer ved dækpladen med LED lys og sving pladen ud.




Er flex-kabel fra betjeningspanel monteret korrekt i MOLEX FCC stikket, på print.




VIGTIGT:
Flex-kabel skal vende korrekt.

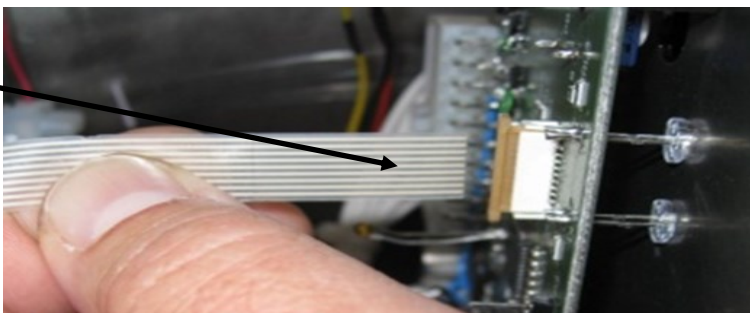


MOLEX FCC stikket på print skal være åben, før flex-kabel stikkes i.

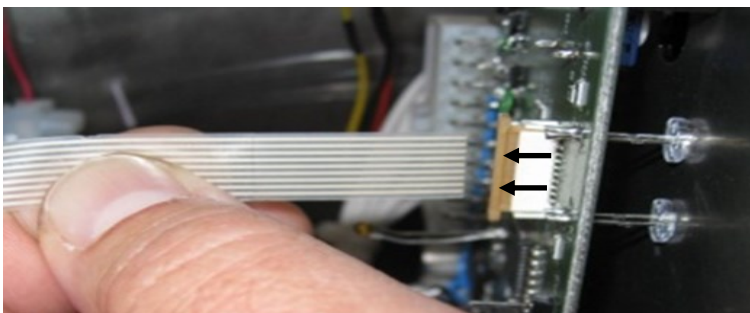

Tryk herefter ned på den brune kant og flex-kablet er nu låst.

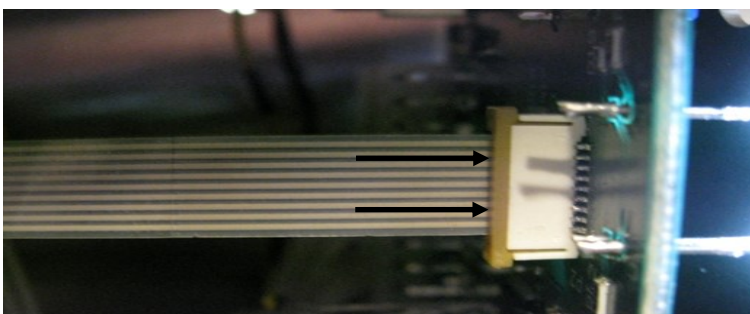


Fase, Nul og Jord ledning, skal monteres.

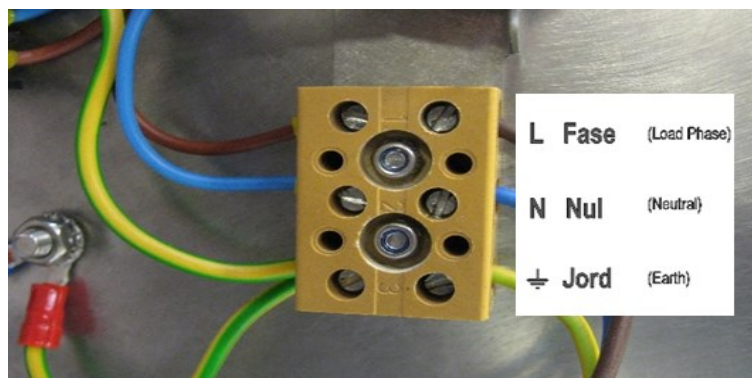



Batteriledning (Rød +12V Batteri) skal monteres på batteriets (Røde pol).

Når ledning monteres på batteriet, bliver sirenen aktiv i max 3 min. eller ind til lågen lukkes.

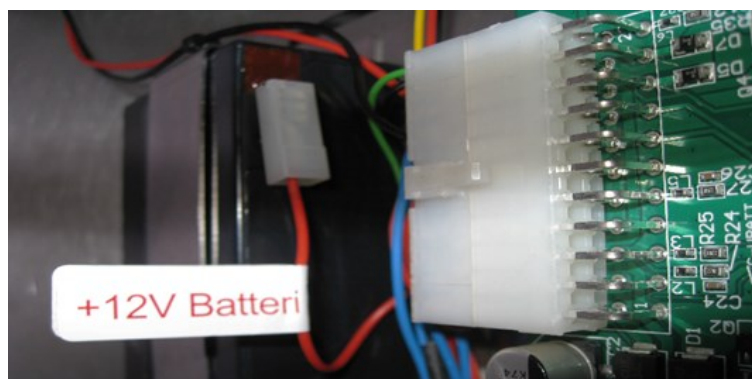

Sirenen kan afbrydes på serviceknappen.

Spænding til skabet, afbrydes ved at trykke på vippekontakten.

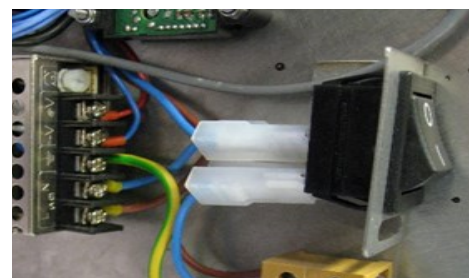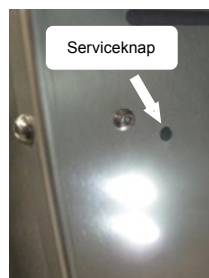


5. Montering af låsepal i lågen:

Det anbefales at prøve låse funktion før låsepal monteres.

Fabriksindstillet kode 1111

Låsepal monteres fast, med de 2 skruer i posen.

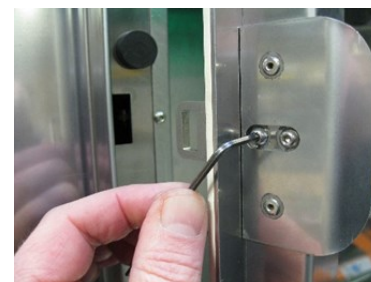

6. Tilmelding af mobil numre / ændring af fabriksindstillet kodelås 1111:

Send en e-mail til ca@clausandersen.dk

Følgende skal oplyses:

- Nummer på skabet.
- Den ønskede talkode efter eget valg (4 cifre).
- Kontaktperson med tlf. og mail.
- Ophængnings adresse.
- Skal de årlige omkostninger til telekort/overvågning og eventuelt service, ikke betales af køber skal anden ønsket faktureringsadresse oplyses.
- EAN nr.


*** Vi anbefaler på det kraftigste at man altid opretter en service aftale, når det er et låst skab.
Det er yderst vigtigt at skabet virker perfekt og altid kan åbnes.**

7. Åbning af skabet: **Fabriksindstillet kode 1111**



Skabet kan huske
2 forskellige, 4 cifret talkoder.

Tast adgangskode!
(Skabet er nu åben.)

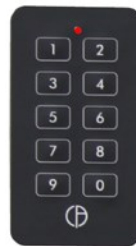

Ved indtastning af forkert kode
lyser rød LED i 2 sek.!

Tast herefter korrekt kode!

8. Vigtigt test af tastatur:

Kontrol test af tastatur. Vi anbefaler at man udfører denne test mindst 1 gang pr. md.

Tryk på tasterne i følgende rækkefølge:

1 - 2 - 3 - 4 = (rød LED lyser i 2 sek.) Når den ikke lyser mere, tryk så på de næste 4 cifre på tastaturet

5 - 6 - 7 - 8 = (rød LED lyser i 2 sek.) Når den ikke lyser mere, tryk så på de næste 4 cifre på tastaturet

9 - 0 - 1 - 2 = (rød LED lyser i 2 sek.) Testen er slut.

Hvis tastaturets røde LED har lyst som beskrevet, virker det som det skal.

Kan denne test ikke gennemføres, kontakt omgående forhandler!

Tast den 4 cifferet adgangs kode på tastaturet (Skabet er nu åben.)

Åbner man lågen, starter *sirene* og *blink* med det samme!

9. Datablad:

Tilslutningsspænding 230 V. (Fase, Nul og Jord)

Strømforbrug ved normal drift = 40 mA (10,2 Wh)

Max. strømforbrug inkl. varmelegeme = 289 mA (66 Wh)

10. Vedligehold / rengøring:

Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året.

Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud.

Hvis anløbninger opstår, er det aflejringer på overfladen og vil let kunne renses af.

Til vanskelige aflejring, anvendes en grydesvamp. **Anvend aldrig ståluld.**